

Sedmero zásad pro správné testování

Test: COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model A
Výrobce: Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd

Pro správný odběr vzorku a vyhodnocení testu dodržujte tyto zásady:

- provedte stěr vzorku některou, a to jednou z těchto variant:
 - z dutiny ústní - pečlivým **několikanásobným setřením z obou krčních mandlí**, a to tak, aby se odběrový tampon na tyčince nedotýkal jazyka,
 - z přední části nosu - jemným zatlačením (dokud neucítíte odpor) vložte odběrový tampon do nosní dutiny a jemným, **několikanásobným, otočením a přitlačením otřete tampon o vnitřní stěnu nosních dutin**. To je doporučeno provést v obou nosních dutinách.
- otevřete uzávěr plastové ampulky, vyjměte tampon z nosu nebo ústní dutiny a rychle ponořte do extrakčního roztoku v plastové ampulce. Po **dobu 30 s tyčinku v ampulce promíchávejte**;
- při vytahování tyčinky **dvěma prsty zmačkněte pastové stěny ampulky, tak aby vytahováním došlo k dokonalému vymačkání obsahu** tampónku do ampulky;
- ampulku uzavřete uzávěrem a **protřepejte**, následně odšroubujte vrchní špičku uzávěru a nakapejte 2 – 3 kapky na test;
- do 5 ti minut od nakapání se začne objevovat první ryska (označena jako C). **Pokud se neobjeví ani po 10 min. od nakapání je test nekorektní** a je nutné ho opakovat s novou sadou;
- v případě pozitivního testu se do 15 min začne objevovat druhá ryska (označena jako T), v případě negativního testu se ryska T neobjeví (a to ani velmi slabým vykreslením);
- test je vhodné pečlivě překontrolovat po 25 min. od provedení. I méně výrazná slabá ryska T znamená pozitivitu testu.**

